

MOTAKK - HCV RNA VİRAL YÜK KANTİTATİF TESTİ İÇİN DEMO KURULUM KİTİ

MOTAKK Dış Kalite Kontrol Ltd. Şti.,

Ankara Üniversitesi Teknokenti E Blok No: 35/133,
Bahçelievler Mh., Gölbaşı, Ankara 06830

E-mail: info@motakk.org - Tel: 0535 961 91 78

www.motakk.org



ÖRNEK KODU	VİRAL YÜK ORT±SS IU/mL	ÖRNEK DOKUSU	ÖRNEK MİKTARI mL	TÜP SAYISI
1-HCV-KK18.01	17.086±11.487	Plazma	1,2	10
2-HCV-KK18.02	7.701±4.357	Plazma	1,2	10
3-HCV-KK18.03	1.455±914	Plazma	1,2	10
4-HCV-KK18.04	4.490±2.788	Plazma	1,2	10
5-HCV-KK18.05	59.810±47.180	Plazma	1,2	10
6-HCV-KK18.06	Negatif	Plazma	1,2	10

≤-20°C'de saklayınız.

Değişik HCV RNA viral yük miktarına sahip veya HCV RNA için negatif örneklerden oluşan HCV-KK18.01'den ve HCV-KK18.06'ya kadar etiketlenmiş, HCV 1702 paneli ve HCV negatif örneklerden oluşan ve 10x6=60 adet 1,2 mL dondurulmuş plazma içeren tüp bulunmaktadır.

* Panel içerisindeki örnekler sadece performans değerlendirilmesi ve araştırma amaçlı kullanım içindir.

Güvenlik Uyarısı:

Bu materyaller insan orijindir ve enfeksiyöz HCV partikülleri içermektedir. Lütfen laboratuvarında klinik örneklerle çalışırken aldığınız tüm laboratuvar güvenlik önlemlerini uygulayınız.

Panel elinize ulaştığında yapılması gerekenler:

1. Panel içindeki materyallerde dökülme, sızma gibi fiziksel problemlerin olmadığını ve tüp içerisindeki plazmalar çözünmüş olsa bile ortam sıcaklığının +4 °C'den fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer +4 °C'den fazla bir ısı olduğunu düşünüyorsanız gönderinin tekrar yapılmasını talep ediniz.
2. Panel içindeki tüplerdeki materyalleri kullanana kadar -20 °C ve altındaki sıcaklıklarda saklayınız.

Panellerin test edilmesi:

Paneldeki materyaller test edileceği zaman, klinik bir örneğe uyguladığınız tüm işlemleri panel içerisindeki materyallere de aynı şekilde uygulamaya özen gösteriniz. Çalışmaya başlamadan önce tüp içerisindeki materyallerin tamamen çözündüğünden ve (tercihen vorteks ile) homojen hale getirildiğinden emin olunuz.

MOTAKK - HCV RNA VİRAL YÜK KANTİTATİF TESTİ İÇİN DEMO KURULUM KİTİ

MOTAKK Dış Kalite Kontrol Ltd. Şti.,

Ankara Üniversitesi Teknokenti E Blok No: 35/133,

Bahçelievler Mh., Gölbaşı, Ankara 06830

E-mail: info@motakk.org - Tel: 0535 961 91 78

www.motakk.org



ÖRNEK KODU		HCV-KK18.01	HCV-KK18.02	HCV-KK18.03	HCV-KK18.04	HCV-KK18.05	HCV-KK18.06
TÜP SAYISI		10	10	10	10	10	10
Ortalama Viral Yük (N=67)	ORT±SS IU/mL	17.086±11.487	7.701±4.357	1.455±914	4.490±2.788	59.810±47.180	Negatif
	Log±SS IU/mL	4,05±0,57	3,77±0,45	3,05±0,34	3,51±0,48	4,58±0,54	Negatif
QIAGEN (n=17)	ORT±SS IU/mL	27.327±14.463	11.305±5.826	2.043±1.117	6.276±3.477	105.729±57.632	Negatif
	Log±SS IU/mL	4,33±0,36	3,99±0,25	3,23±0,29	3,73±0,26	4,92±0,34	Negatif
IONTEK (n=4)	ORT±SS IU/mL	2.130±722	1.212±230	226±44	861±319	8.902±2.018	Negatif
	Log±SS IU/mL	3,3±0,14	3,08±0,08	2,35±0,08	2,91±0,16	3,94±0,1	Negatif
ABBOTT (n=5)	ORT±SS IU/mL	4.943±5.735	4.762±1.061	840±133	1.282±1.868	11.678±12.780	Negatif
	Log±SS IU/mL	3,27±0,65	3,67±0,1	2,92±0,07	2,36±0,94	3,87±0,38	Negatif
ANATOLIA GENEWORKS (n=9)	ORT±SS IU/mL	9.097±2.528	5.734±1.796	696±341	2.704±915	35.744±34.692	Negatif
	Log±SS IU/mL	3,94±0,12	3,74±0,13	2,79±0,21	3,41±0,14	4,44±0,27	Negatif
RTA (n=7)	ORT±SS IU/mL	12.110±3.519	4.543±1.099	587±287	2.371±983	41.886±15.272	Negatif
	Log±SS IU/mL	4,06±0,15	3,64±0,1	2,71±0,24	3,34±0,18	4,59±0,19	Negatif
ROCHE (n=22)	ORT±SS IU/mL	20.745±2.555	9.579±1.532	1.916±254	5.676±756	62.786±16.381	Negatif
	Log±SS IU/mL	4,31±0,05	3,98±0,07	3,28±0,06	3,75±0,06	4,79±0,09	Negatif