

MOTAKK - HBV DNA VİRAL YÜK KANTİTATİF TESTİ İÇİN İNTERNAL KONTROL

MOTAKK Dış Kalite Kontrol Ltd. Şti.,

Ankara Üniversitesi Teknokenti E Blok No: 35/133,
Bahçelievler Mh., Gölbaşı, Ankara 06830

E-mail: info@motakk.org - Tel: 0535 961 91 78

www.motakk.org



KOD	VİRAL YÜK ORT±SS IU/mL	DOKU/ MİKTAR mL	TÜP SAYISI
HBV-İK18.02	1.206±434	1,2	25

≤-20°C'de saklayınız.

HBV-İK18.02 olarak etiketlenmiş, 1.206±434 IU/mL HBV DNA viral yük miktarına sahip 25 adet 1,2 mL hacimde dondurulmuş plazma içeren tüp bulunur.

* Kutu içerisindeki internal kontrol plazma, sadece kalite kontrol değerlendirmesi ve araştırma amaçlı kullanım içindir.

Güvenlik Uyarısı:

Bu materyaller insan orijindir ve enfeksiyöz HBV partikülleri içermektedir. Lütfen laboratuvarında klinik örneklerle çalışırken aldığınız tüm laboratuvar güvenlik önlemlerini uygulayınız.

İnternal Kontrol elinize ulaştığında yapılması gerekenler:

1. Internal Kontrol kutusu içindeki materyallerde dökülme, sızma gibi fiziksel problemlerin olmadığını ve tüp içerisindeki plazmalar çözünmüş olsa bile ortam sıcaklığının +4 °C'den fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer +4 °C'den fazla bir ısı olduğunu düşünüyorsanız gönderinin tekrar yapılmasını talep ediniz.
2. Internal Kontrol kutusu içindeki tüplerdeki materyalleri kullanana kadar -20 °C ve altındaki sıcaklıklarda saklayınız.

İnternal Kontrollerin test edilmesi:

İnternal kontroller test edileceği zaman, klinik bir örneğe uyguladığınız tüm işlemleri, internal kontrol materyalleri için de aynı şekilde uygulamaya özen gösteriniz. Çalışmaya başlamadan önce tüp içerisindeki materyallerin tamamen çözündüğünden ve (tercihen vorteks ile) homojen hale getirildiğinden emin olunuz.