



## HCV RNA Genotip Paneli Kullanım

### Klavuzu

**Tablo 1. HCV-Gtp Panel İeriği\***

PANEL	Örnek	Hacim (ml)
HCV-Gtp0000	HCV-Gtp0000.01	1,2
HCV-Gtp0000	HCV-Gtp0000.02	1,2
HCV-Gtp0000	HCV-Gtp0000.03	1,2
HCV-Gtp0000	HCV-Gtp0000.04	1,2
HCV-Gtp0000	HCV-Gtp0000.05	1,2

Farklı ve/veya aynı HCV RNA genotipleri ve subtiplerine sahip örneklerden oluşan, HCV-Gtp0000.01'den ve HCV-Gtp0000.05'e kadar etiketlenmiş, dondurulmuş plazma içeren 5 adet tüp bulunmaktadır (Tablo 1).

\* Panel içerisindeki örnekler sadece performans değerlendirilmesi ve araştırma amaçlı kullanım içindir.

#### Güvenlik Uyarısı:

Bu materyaller insan orijinelidir ve enfeksiyöz HCV partikülleri içermektedir. Lütfen laboratuvarında klinik örneklerle çalışırken aldığınız tüm laboratuvar güvenlik önlemlerini uygulayınız.

#### Panel elinize ulaştığında yapılması gerekenler:

1.Panel içindeki materyallerde dökülme, sızma gibi fiziksel problemlerin olmadığını ve tüp

içerisindeki plazmalar çözünmüş olsa bile ortam sıcaklığının +4 °C dereceden fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer +4°C' den fazla bir ısı olduğunu düşünüyorsanız gönderinin tekrar yapılmasını talep ediniz.

2.Panel içindeki tüplerdeki materyallerin testini yapana kadar -20 °C ve altındaki sıcaklıklarda saklayınız.

#### Panel testi ve sonuç girilmesi:

Paneldeki materyaller test edileceği zaman , klinik bir örneğe uyguladığınız tüm işlemleri panel içerisindeki materyallere de aynı şekilde uygulamaya özen gösteriniz. Çalışmaya başlamadan önce tüp içerisindeki materyallerin tamamen çözüldüğünden ve (tercihen vorteks ile) homojen hale getirildiğinden emin olunuz. Sonuçlar çıktıktan sonra [www.motakk.org](http://www.motakk.org) adresinden size ait olan kullanıcı adı ve şifre ile girdikten sonra ilgili tabloları doldurarak sonuçları sisteme yükleyiniz. Sonuçlarınızın eksiksiz ve belirtilen son tarihten önce sisteme girilmesi analiz edilmesi ve raporlanması açısından önem taşımaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen 0 535 961 9178 numaralı telefonu arayınız.

### MOTAKK DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI

web: [www.motakk.org](http://www.motakk.org)

e-posta: [info@motakk.org](mailto:info@motakk.org)

tel: 0 535 971 9178