



## BK DNA Viral Yük Paneli

### Kullanım Kılavuzu

**Tablo 1. BK-K Panel İçeriği\***

PANEL	Örnek	Hacim (ml)
BK-K0000	BK-K0000.01	1,2
BK-K0000	BK-K0000.02	1,2
BK-K0000	BK-K0000.03	1,2
BK-K0000	BK-K0000.04	1,2

*Değişik BK DNA viral yük miktarına sahip veya BK DNA için negatif örneklerden oluşan BK-K0000.01'den ve BK-K0000.04'e kadar etiketlenmiş, dondurulmuş biyolojik materyal içeren 4 adet tüp bulunmaktadır (Tablo 1).*

*\* Panel içerisindeki örnekler sadece performans değerlendirilmesi ve araştırma amaçlı kullanım içindir.*

#### **Güvenlik Uyarısı:**

Bu materyaller insan orijinelidir ve enfeksiyöz BK partikülleri içermektedir. Lütfen laboratuvarda klinik örneklerle çalışırken aldığınız tüm laboratuvar güvenlik önlemlerini uygulayınız.

#### **Panel elinize ulaştığında yapılması**

##### **gerekenler:**

1. Panel içindeki materyallerde dökül-me, sızma gibi fiziksel problemlerin

olmadığını ve tüp içerisindeki biyolojik materyal çözünmüş olsa bile ortam sıcaklığının +4 °C dereceden fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer +4 °C' den fazla bir ısı olduğunu düşünüyorsanız gönderinin tekrar yapılmasını talep ediniz.

2. Panel içindeki tüplerdeki materyallerin testini yapana kadar -20 °C ve altındaki sıcaklıklarda saklayınız.

#### **Panel testi ve sonuç girilmesi:**

Paneldeki materyaller test edileceği zaman, klinik bir örneğe uyguladığınız tüm işlemleri panel içerisindeki materyallere de aynı şekilde uygulamaya özen gösteriniz. Çalışmaya başlamadan önce tüp içerisindeki materyallerin tamamen çözündüğünden ve (tercihen vorteks ile) homojen hale getirildiğinden emin olunuz. Sonuçlar çıktıktan sonra [www.motakk.org](http://www.motakk.org) adresinden size ait olan kullanıcı adı ve şifre ile girdikten sonra ilgili tabloları doldurarak sonuçları sisteme yükleyiniz. Sonuçlarınızın eksiksiz ve belirtilen son tarihten önce sisteme girilmesi analiz edilmesi ve raporlanması açısından önem taşımaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen 0 535 961 9178 numaralı telefonu arayınız.

---

#### **MOTAKK DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI**

**web: [www.motakk.org](http://www.motakk.org)**

**e-posta: [info@motakk.org](mailto:info@motakk.org)**

**tel: 0 535 961 9178**